


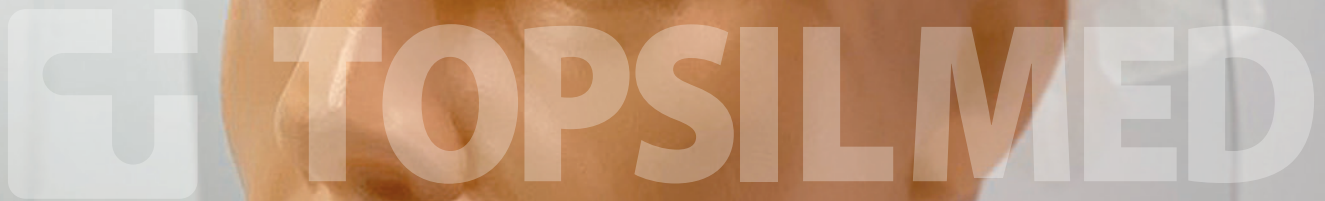

Solutions for a healthy future

PRZYŁBICA **MEDYCZNA**

Do indywidualnej ochrony twarzy oraz górnych dróg oddechowych



Solutions for a healthy future



Solutions for a healthy future



Wyprodukowano
w Polsce

www.topsilmed.com

Czym jest przyłbica medyczna?

- Przyłbica medyczna jest wyrobem przeznaczonym do indywidualnej ochrony oczu, ust i twarzy
- Przeznaczona dla personelu medycznego i innych osób pracujących w środowisku medycznym
- Chroni przed rozbryzgami cieczy oraz bezpośrednim kontaktem z wydychanym powietrzem osoby chorej
- Zabezpiecza twarz i usta przed bezpośrednim kontaktem z dłońmi użytkownika
- Niweluje ryzyko wprowadzenia infekcji do górnych dróg oddechowych
- **Przyłbica może zastępować maseczkę dla osób poruszających się w przestrzeni publicznej**



Jak używać?

Przyłbicy używa się poprzez nałożenie na głowę po wcześniejszym dopasowaniu jej rozmiaru do obwodu głowy. Regulację przyłbicy można przeprowadzić poprzez regulację silikonowego paska i umieszczenia zaczepu w odpowiednim otworze. Należy zwrócić uwagę czy szyba wizyjna jest czysta i nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

W jakim celu stosować?

Przyłbicę stosuje się w celu ochrony oczu, ust i twarzy przed rozbryzgami cieczy i zminimalizowaniu kontaktu twarzy i górnych dróg oddechowych z wirusami i bakteriami. Uwaga! Przyłbica nie chroni przed zarażeniem wirusami i bakteriami ale w sposób znaczący może wpływać na zmniejszenie ryzyka zarażenia i przenoszenia wirusów bądź bakterii.

Najważniejsze cechy produktu

- Przyłbica jest zarejestrowana jako **wyrób medyczny** i ma możliwość zastosowania w placówkach służby zdrowia. Spełniając normy: PN EN-ISO 14971:2012 oraz PN EN-ISO15223-1:2017
- Przyłbica **spełnia wymagane normy** bezpieczeństwa wzroku dla tej grupy produktów: PN EN 167:2005, PN EN 168:2005 oraz PN EN 166:2005
- Szyba **zbudowana z PET-G** który posiada certyfikat dla kontaktu z żywnością (food contact) przez co można go uznać również za bezpieczny dla skóry
- Pasek silikonowy **gwarantuje brak reakcji alergicznych** w kontakcie ze skórą głowy, jest miękki i przyjemny w kontakcie. Umożliwia noszenie przyłbicy przez wiele godzin.
- **Łatwy montaż** przyłbicy daje szeroki zakres regulacji zarówno paska jak i szyby. Możliwość wyregulowania szyby na pasku tak aby używały jej osoby w okularach.
- Kształt przyłbicy **umożliwia nieskrępowane ruchy głową**, co jest istotne w pracy fizycznej wykonywanej przez np. personel medyczny.
- Konstrukcja przyłbicy **umożliwia szybką wentylację** na boki, przez co przyłbica nie paruje.
- Przyłbica **może być dezynfekowana** ogólnodostępnymi środkami dezynfekującymi w tym również na bazie chloru np. podchlorynami stosowanymi w szpitalach.



Producent

Topsil Med Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6 96-321 Żabia Wola, Polska
tel. + 48 46 819 30 50, e-mail: info@topsilmed.com