



PRZYŁBICA OCHRONNA JUNIOR

Do indywidualnej ochrony twarzy oraz górnych dróg oddechowych dziecka



Ostrzeżenie!

UWAGA: Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Zwróć uwagę na wymagania bezpieczeństwa i obsługi, ostrzeżenia i ograniczenia. Używaj tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Odstępstwa od tych zasad mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.

1 Czym jest przyłbica ochronna Junior?

Przyłbica ochronna Junior jest wyrobem przeznaczonym do indywidualnej ochrony oczu, ust oraz twarzy dzieci przed rozbryzganiami cieczy oraz bezpośrednim kontaktem z wydychanym powietrzem osoby chorej. Zabezpiecza ona również twarz i usta dziecka przed bezpośrednim kontaktem z dłońmi i tym samym niweluje ryzyko wprowadzenia infekcji do górnych dróg oddechowych.

2 W jakim celu stosuje się przyłbicę ochronną Junior?

Przyłbicę stosuje się w celu ochrony oczu, ust i twarzy dziecka przed rozbryzganiami cieczy i zminimalizowaniu kontaktu twarzy i górnych dróg oddechowych z wirusami i bakteriami. Uwaga! Przyłbica nie chroni dziecka przed zarażeniem wirusami i bakteriami ale w sposób znaczący może wpływać na zmniejszenie ryzyka zarażenia i przenoszenia wirusów bądź bakterii. Praktycznie eliminuje bezwiedny kontakt dłoni z nosem, ustami i oczami dziecka.

3 Jak używać Przyłbicy ochronnej Junior?

Przyłbicę używa się poprzez nałożenie jej na głowę dziecka po wcześniejszym dopasowaniu jej rozmiaru do obwodu głowy. Regulację przyłbicy można przeprowadzić poprzez regulację silikonowego paska i umieszczenia zaczepu w odpowiednim otworze. Należy zwrócić uwagę czy szyba wizyjna jest czysta i nie posiada uszkodzeń mechanicznych.

4 Kiedy nie powinno się używać przyłbicy ochronnej Junior?

Przyłbicę nie powinno się stosować w innych przypadkach niż te, dla których jest ona przeznaczona. Powinno zaprzestać się jej używania, kiedy uległa ona mechanicznemu uszkodzeniu np. pęknięcie szyby wizyjnej, jej zarysowaniu, lub uszkodzeniu systemu mocowania do głowy.

5 Możliwe działania niepożądane

Przyłbica rzadko powoduje działania niepożądane, zwykle może wystąpić zaczerwienienie, bolesność lub podrażnienie miejsca bezpośredniego kontaktu skóry głowy z przyłbicą. Użyta w masce szyba jest wygięta i daje refleksy co może powodować m.in. bóle głowy. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zaprzestać jej stosowania.

6 Przechowywanie i konserwacja przyłbicy

Przyłbicę przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przyłbica nie powinna być wykorzystywana przez dziecko bez nadzoru osoby dorosłej. Przyłbicę należy czyścić miękką ściereczką z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych.

7 Instrukcja składania

Przyłbica ochronna Junior do indywidualnej ochrony twarzy i górnych dróg oddechowych dziecka. Montaż w 4 krokach:

- A Rozpakuj wszystkie elementy przyłbicy
- B Przewlec opaskę silikonową przez otwory w szybie (patrz rysunek)
- C Skręć klips wraz z opaską silikonową w odpowiednim otworze (patrz rysunek)



Producent


Topsil Med Sp. z o.o.
ul. Graniczna 6 96-321 Żabia Wola, Polska
tel. + 48 46 819 30 50
e-mail: info@topsilmed.com

Solutions for a healthy future




Kompletny zestaw zawiera: szybę ochronną PET-G (poliester glikolowy)
oraz pasek silikonowy wraz z klipsami (nylon, PE)

Zestaw zawiera:

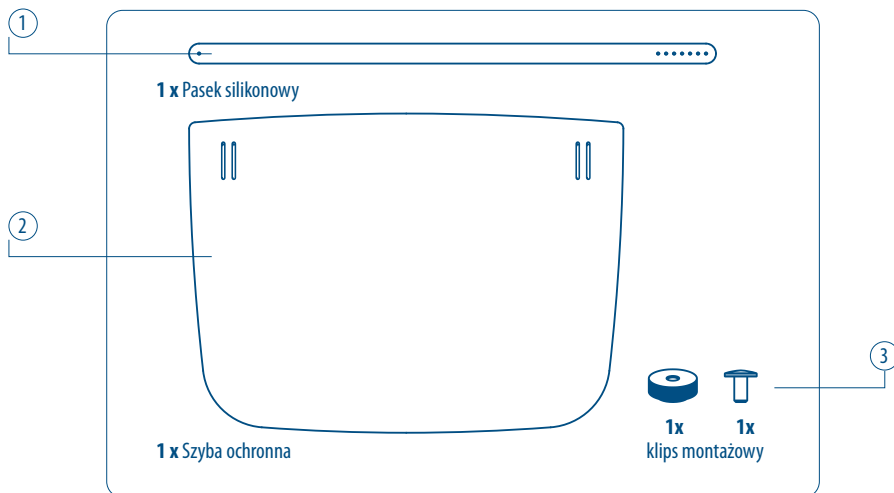

Montaż elementów przyłbicy ochronnej:

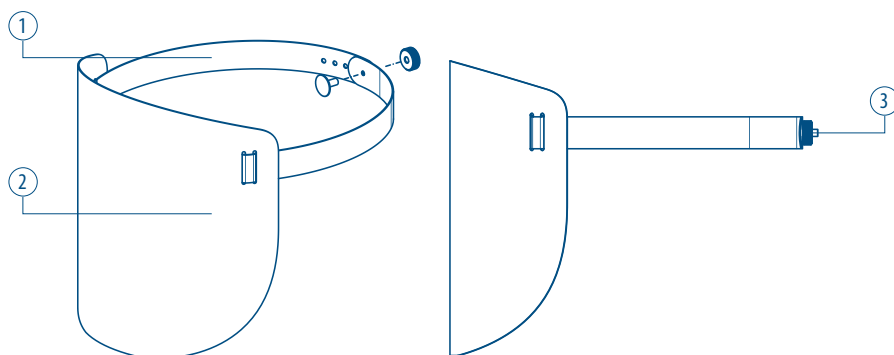

Solutions for a healthy future